



VAH gelistet*

Quick DES Wipes Maxi N

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung im gewohnten Vliestuchspender
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in patientennahen Bereichen

Präparatetyp

Quick Des Wipes N sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung. Quick DES Wipes Maxi N bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Zusammensetzung

100g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Gem. EU-Medizinproduktverordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendung

Flächen mit Safeline Quick Des Wipes N bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/ Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden

Anwendungshinweis

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:	
bakterizid, levurozid:	2 min
tuberkulozid (M. terrare):	30 s
mykobakterizid (M. avium und M. terrae):	1 min
begrenzt viruzid:	1 min
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Beutel à 90 Tücher	1 x 1 Beutel	09929-N
Quick Des Wipes Maxi N: baua: Reg.-Nr. N-100050		

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.



AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benzstr. 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany

Tel. +49 (0)4171- 8480-0 • www.ampri.de • info@ampri.de



bioSight GmbH

Brasselsbergstr. 3 • 34132 Kassel • Tel.: +49 (0)561 81678111